

## Raskere fiksering ved undertrykksbehandling av sår!

**Suprasorb®CNP Easy Dress** brukes som sekundærbandasje til forsegling av sår i forbindelse med vakuumbehandling.

Den består av en tubeformet bandasje som er åpen i den bredeste enden, laget av vandampgjennomtrengelig polyuretanfilm.

Fikses med filmstriper for å oppnå en luft-tett applisering.



## Mange fordeler!

- Kan benyttes sammen med alle typer pumper.
- Rask applisering selv for de som er urutinerte.
- Pakket sterilt.
- Fleksibelt materiale.
- Hindrer ikke mobilisering.
- Kan brukes til de fleste sårområdene.
- Hudvennelig fordi det er et ikke-klebende materiale.
- Høy fordampningsevne

### Raskt applisering



- Opptil 90% raskere sårskift enn tradisjonell fiksering.
- Kostnadseffektiv

### Enkel å bruke



- Enkel og trygg
- Sikrer raskt negativt trykk på vanskelig anatomiske steder.
- Kan klippes i for bedre tilpassing

### Pasientvennlig



- Hindrer ikke bevegelse
- Høy fordampningsevne hindrer maserasjon av huden under.
- Hudvennelig

## Indikasjoner:

- Sekundærbandasje til bruk ved undertrykksbehandling av sår (CNP/VAC/NPWT).



## Forsiktighetsregler:

- Kjent allergi og eller overfølsomhet mot produktets materiale.
- Fikseringsfilmene må ikke strekkes under fikseringen da det kan redusere blodforsyningen.

## Bruksanvisning

- Såret renses/debrideres og vakumskiftet utføres etter gjeldende prosedyrer. Svamp eller gauze benyttes i såret. Huden rundt såret skal være tørr og ren.
- Tilpass EasyDress bandasjen. Den bør gå ca 2 cm utover tær/fingre og det bør være minst 12 cm fra sårkanten til den åpne enden av EasyDress bandasjen.
- Negler bør klippes korte og mellomrom mellom tær og fingre kan eventuelt "polstres" med Kerlix eller Sorbact.
- Forme bandasjen inn til huden og legg den dobbel som en "Z". Fest fikseringsfilmene som medfølger rundt hele åpningen slik at den blir luft-tett.
- Klipp hull til porten og koble til pumpen.
- Anbefalt innstilt undertrykk på mellom -80 og -125 mmHg.
- Må byttes ved hvert sårskift.

## Suprasorb® CNP EasyDress

Lev. Art.nr	størrelse	Omkrets og lengde (cm)			Fiksering strimler	Avd.fp	Trp.fp
		1.Omkrets bredeste ende	2. Omkrets smaleste ende	3.Lengde			
LR34901	s	50 cm	30 cm	70 cm	5 stk	5	40
LR34902	M	65 cm	40 cm	85 cm	7 stk	5	40
LR34903	L	80 cm	50 cm	95 cm	8 stk	5	40

### Produktmateriale

- Polyuretanfilm som er gjennomtrengelig for vanddamp, men luft- og bakterietett. Gjennomsiktig.
- Fikseringsfilmer/strips av polyuretan påført klebemiddel av polyakrylat.
- Lateks-fri.

### Suprasorb® CNP EasyDress

- CE- merket i henhold til MDR klasse 1.
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Holdbar i 3 år fra produksjonsdato.
- Produktemballasje av cellulose, polyamide og polyethylene.
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet behandles som brennbart avfall i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.